

COLIN Moneo BP-88Si 保守点検マニュアル

電源投入前

外観

- ・落下等による変形はないか
- ・汚れがひどくないか
- ・濡れていないか

アース線

- ・アース端子はしっかりと締まっているか
- ・アース線に断線はないか
- ・壁面の接地端子への接続は確実か

電源コード

- ・本体のコネクタにしっかりと入っているか
- ・3P コンセント接続時、3P・2P 変換アダプタを使用していないことを確認
- ・電源コードの上に重い物を置いていないか
- ・電源コードは傷んでいないか

電源投入後

外観

- ・けむりが出たり、変なにおいはないか
- ・異常な音が聞こえないか

時刻の確認

- ・時刻は正しくセットされているか

スイッチ&ランプ

- ・各スイッチを押し、その機能が働くことを確認する
- ・スイッチを押したときにランプが点灯するものについては、その点灯も確認する

警報音

- ・警報音を鳴らしたとき、確実に警報音が聞き取れることをかくにんする

カフ血圧計

- ・カフを点検者の上腕に巻き、測定しふだんの血圧に近いことを確認する
- ・測定中に腕をまげ、体動による排気停止をさせ、その停止中にカフ圧が低下しないことを確認する

パルスオキシメータ

- ・オキシセンサを指に取り付け値が表示されることを確認する

ECG

- ・機器背面の ECG チェック端子に ECG リード線のクリップを取り付け、心拍数、波形の表示されることを確認する