

# IABP セーフティディスク交換マニュアル

2009年1月20日

臨床工学部

- 1、 自動充填ポート、ドレーンポートを外す、次に CRM 電源コネクタを本体から外す
- 2、 ディスクユニットを反時計回りに 30°程度回転させ真っ直ぐ引っ張り出して取り外す (図 1)

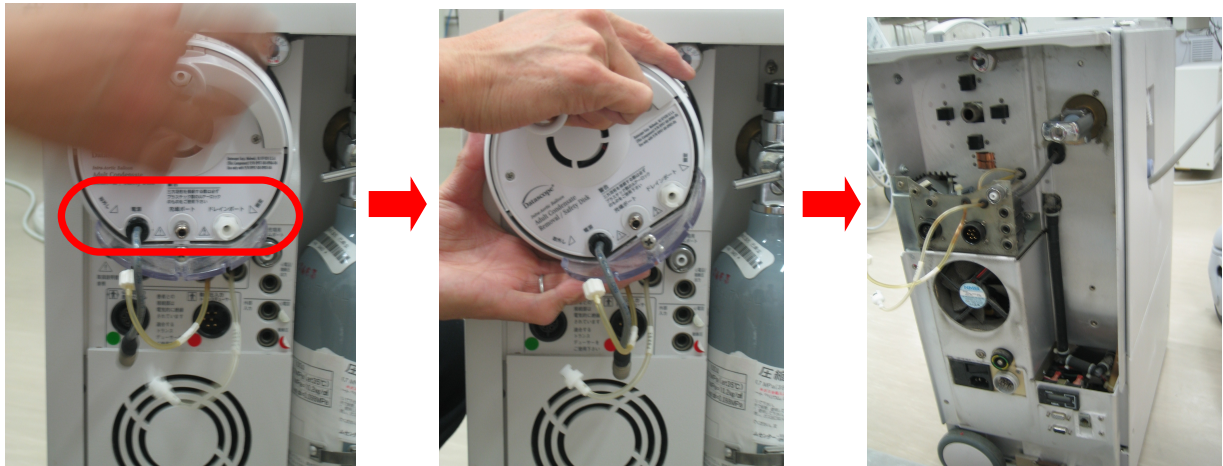


図 1 セーフティディスクの取り外し方

- 3、 取り外したディスクユニットの 12 時と 6 時の方向にあるネジを緩めて CRM とディスクを取り外す  
交換時間や交換時期の記載しているシールを剥がす。 ( ← 部)



図 2 ネジの位置

4、新しいセーフティディスクの橙キャップをはずして交換する

このときにカーブした穴が IAB ヘリウム接続口と同じレベルになるように固定すること



5、ネジで固定する



5、ディスクユニットを時計回りに 30℃程度回転させ取り付ける

6、自動充填ポート、ドレーンポート、CRM 電源コネクタを接続する

7、セーフティディスクリークテストの実施