

TCI ポンプ TE-371 メンテナンスマニュアル

作成日 2007/1/18

臨床工学部

1. 流量、閉塞圧測定

流量、閉塞圧測定は TE331S 同様、IDA-4 を用いて行う。

F3(ml/h)モードで行う。

2. ディプリバンシリンジの検出

ディプリバンシリンジを識別タグに装着し、ディプリバン1%と表示されること。

3. パラメータの入力

TCI モード (F1) で設定ダイヤルを回して年齢、体重、目標血中濃度の設定ができること。

4. 動作チェック

開始ボタンを押し、動作インジケータが回転点灯し、液晶表示部がグラフ画面に切り替わり、注入時間と濃度のグラフが表示されること。

グラフが表示されている状態で F 1、F2 ボタンを押すと濃度および時間のスケールが変更できること。

5. 濃度変更

運転動作中、設定ダイヤルを回転させ目標血中濃度を変更し、OK を押すと変更完了すること。