

輸液、シリンジポンプ メンテナンスマニュアル

作成日 2007/2/21

臨床工学部

1. ポンプの外観チェックを行う。
ヒビテンで外装の清拭をする。
2. ポンプの流量、閉塞圧計測を行う。
 - 1) ポンプにシリンジまたはチューブをセットする。
 - 2) IDA-4 Plus 本体背面の電源を入れる。
 - 3) 立ち上がったら Channel 1～4 までの Channel を選択し、ポンプと接続したチューブをセットする。
その Channel の SET UP ボタンを押す。
 - 4) 閉塞圧計測を行う場合は、画面の OCCLUSION を選択する。
画面に WAIT と表示されしばらくすると START と表示されるのでポンプを開始する。
ポンプの閉塞アラームが発生した時点の圧力をチェックする。
 - 5) 流量計測を行う場合は、画面の FLOW を選択する。
画面に WAIT と表示されしばらくすると PRIME と表示されるのでポンプを早送りし、AUTO START と表示されるまでプライミングを行う。
輸液ポンプは 50ml/h、シリンジポンプは 20ml/h にセットし開始ボタンを押してから AUTO START を押す。
流量が安定した時点(約 10 分以上)の平均値を測定する。
 - 6) 終了する場合は、終了したい Channel 画面で END を選択し、次に DELETE を押すと終了する。